

lipo

LIPOSOMALES AUGENSPRAY

Liposomales Augenspray

Konservierungsmittelfreie, sterile, benetzende, feuchtigkeitsspendende, schützende und erfrischende Lösung zur Anwendung bei offenen oder geschlossenen Augen, isotonisch, biokompatibel, gepuffert, mit Liposomen und vernetzter Hyaluronsäure. Sie verschafft der Augen- und Lidpartie Linderung bei empfindlichen und trockenen Augen. Dank seiner milden Formulierung kann das Augenspray auch beim Tragen von Kontaktlinsen verwendet werden. Der Verzicht auf Konservierungsstoffe verringert das Risiko von Nebenwirkungen, wodurch sich das Augenspray auch für Therapien eignet, die eine häufige und längere Anwendung erfordern, wie z. B. dem nächtlichen Einsatz zum Schutz der Hornhaut.

Indikationen

Benetzt, befeuchtet, schützt und erfrischt empfindliche und trockene Augen, sowie die Augen- und Lidpartie. Lindert juckende Augen, Brennen und Fremdkörpergefühl. Ideal bei nicht-traumatischen und nicht-pathologischen Veränderungen des Tränenfilms. Ideal bei umweltbedingter Augenbelastung (Sonne, Wind, Staub, Klimaanlage, trockene und verschmutzte Luft usw.). Ideal bei Sehstress (längerer Computernutzung, ungünstigen Lichtverhältnissen, Nachtfahrten usw.). Geeignet zur Anwendung während des Tragens von Kontaktlinsen. Produktkompatibel mit homöopathischen Mitteln.

Gebrauchsanweisung

Das Produkt kann mit offenen oder geschlossenen Augen verwendet werden. Vor Gebrauch schütteln. Bei der ersten Verwendung drei- bis viermal auf die Zerstäuberdüse drücken. Die Flasche festhalten, den Daumen auf die Zerstäuberdüse legen und darauf achten, die Düse nicht mit dem Finger zu verdecken. Den Zerstäuber etwa 10 cm vom Auge entfernt, in einer seitlichen Position halten. Bei Verwendung mit offenen Augen den Blick nach vorne gerichtet halten, so dass sich die Flasche am seitlichen Rand des Blickfeldes befindet. Einen festen Druck auf die Zerstäuberdüse ausüben, um eine effektive Zerstäubung der Lösung zu erreichen. Es ist ratsam, bei jeder Anwendung zweimal zu sprühen, auch mehrmals am Tag.

Für Kontaktlinsträger: Sprühen Sie vor oder nach dem Aufsetzen 1-2 Mal auf die Kontaktlinse. Bei Bedarf mit getragener Kontaktlinse ins Auge sprühen. Bei der Anwendung bei Kindern muss das Produkt von einem Erwachsenen angewendet werden. Entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen.

Zusammensetzung

Liposomen, 0,02 % vernetzte Hyaluronsäure, Dinatriumedetat, gepufferte isotonische Lösung mit einem pH von 7,2. FREI VON: Konservierungsmitteln, Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Parabene, Thiomersal und Bestandteilen tierischen Ursprungs.

Warnhinweise

Bei Augenreizungen die Anwendung abbrechen und einen Facharzt aufsuchen. Nicht verwenden bei Allergie oder Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Produkts. Fragen Sie Ihren Arzt bevor Sie das Produkt bei Kindern unter 3 Jahren, während der Schwangerschaft, des Stillens oder bei anderen Pathologien anwenden. Nicht einfrieren. Von Wärmequellen fernhalten und an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35 °C lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einnehmen. Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Innerhalb von 180 Tagen nach der ersten Öffnung verwenden. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt erscheint. Die Augenoberfläche nicht mit dem Zerstäuber berühren. Die Flasche nach dem Gebrauch fest verschließen. Das Produkt mindestens 5 Minuten vor oder nach der Verabreichung anderer Produkte zur medizinischen Anwendung am Auge verabreichen.

HLTAG117P17mLSpray10l090824

10 ml

 meineLinse

STERILE A



F1004 Rev. 28/10/24

 0051

 **Omisan farmaceutici**
via G. Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy
www.omisan.com

 **MPG&E**

distributed by MPG&E Handel und Service GmbH,
Moonweg 105, D-24582 Bordesholm,
www.mpg.de