

Pflegeanweisung für SOLOCARE AQUA®

by MENICON



1/ Waschen Sie Ihre Hände gründlich.

Achten Sie darauf, dass Seifenreste gut abgespült werden. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch zum Abtrocknen Ihrer Hände.



2/ Öffnen Sie den MicroBlock® Behälter und die SOLOCARE AQUA® Flasche.

Entnehmen Sie die rechte Linse und spülen diese mit SOLOCARE AQUA® ab.

Achtung: Um Verwechslungen zu vermeiden, wird empfohlen immer die gleiche Kontaktlinse zuerst auf das Auge zu setzen!



3/ Setzen Sie die Kontaktlinsen auf.

Nutzen Sie hierzu die entsprechenden Handhabungshinweise des Herstellers. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Linse.

4/ Schütten Sie die gebrauchte SOLOCARE AQUA® Lösung aus dem Microblock® Behälter weg.

Spülen Sie dann den Behälter mit frischer SOLOCARE AQUA® Lösung aus.

5/ Verschließen Sie die SOLOCARE AQUA® Flasche wieder, ebenso den Microblock® Behälter.

Der Microblock® Behälter darf nicht geöffnet an der Luft trocknen.

AM
MORGEN



- 1/ Waschen Sie Ihre Hände gründlich.**
Achten Sie darauf, dass Seifenreste gut abgespült werden. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch zum Abtrocknen Ihrer Hände.



- 2/ Füllen Sie den MicroBlock® Behälter bis zur Fülllinie mit frischer SOLOCARE AQUA® Lösung auf.**

Achtung: Um Verwechslungen zu vermeiden, wird empfohlen immer die gleiche Kontaktlinse zuerst vom Auge abzusetzen!



- 3/ Nach dem Absetzen der Kontaktlinse, legen Sie diese in die Handinnenfläche. Geben Sie auf jede Seite der Kontaktlinse mindestens 3 Tropfen SOLOCARE AQUA®. Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen mindestens **10 Sekunden** lang. Spülen Sie die Linse gründlich mit SOLOCARE AQUA® ab.**

- 4/ Geben Sie die Linse in die entsprechende Linsenhalterung des Microblock® Behälters.**

Wiederholen Sie die bisherigen Pflegeschritte mit der anderen Linse, geben Sie dann die Linsenhalterung in den Behälter und schrauben diesen fest zu.

- 5/ Lassen Sie Ihre Linsen mindestens 5 Minuten oder über Nacht in SOLOCARE AQUA® aufbewahrt.**

AM
ABEND

WICHTIG!
Tauschen Sie Ihren MicroBlock® Behälter regelmäßig mit jeder neuen Flasche SOLOCARE AQUA® aus.